

814759 M1


TOPRO

Sete komplett, TOPRO Troja M/S
Seat complete, TOPRO Troja M/S
Sitz vollständig, TOPRO Troja M/S

Innhold:	1x 716650	Sete
	2x 716701	Bakre feste
	1x 814759M1	Monteringsanvisning
Contents:	1x 716650	Seat
	2x 716701	Rear Bracket
	1x 814759M1	Mounting instructions
Inhalt:	1x 716650	Sitz
	2x 716701	Hintere Befestigung
	1x 814759M1	Montageanweisung



1. Slå rullatoren litt i sammen.
Ta deretter av gummistrikkene og utlørsnoren.
1. Clap the walker almost together.
Thereafter, remove the rubber band on both sides and the ripcord.
1. Den Rollator etwas zusammenfallen.
Danach die Gummibänder und die Greif-schnur den Klappmechanismus.

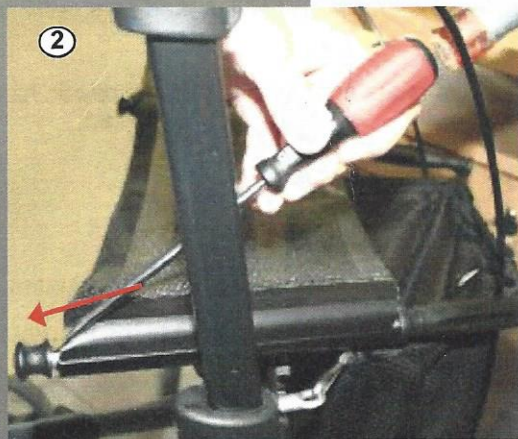


- 2 Slå av begge bakre kurvester
- 2 Remove both rear brackets.
2. Die beiden Befestigungen der Seiten stangen herauschlagen.




3. Trekk ut begge setefestestengene.
3. Pull out both fitting bars.
3. Die Seitenstange heraus ziehen.

814759

Sete komplett, TOPRO Troja S/M
 Seat complete, TOPRO Troja S/M
 Sitz vollständig, TOPRO Troja S/M

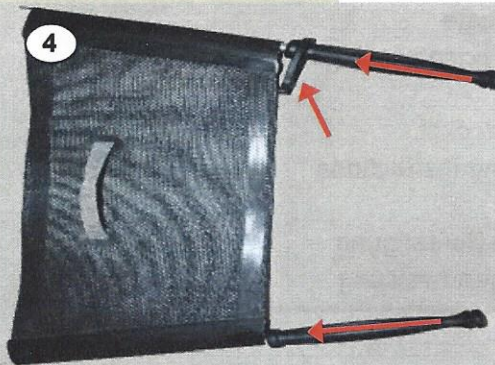

4. Legg det nye setet som vist på bilde og skyv begge setefestestengene helt inn. **Pass på at stangen med låseklipset blir montert på høyre side.(Sett forfra.)**
4. Hold the new seat as shown, and thread both fitting bars into the seat. **Mount the bar with the lock clips on the right side. (seen from the front.)**
4. Das neue Sitznetz Lt. Foto anbringen und die Stangen ganz hereinschieben. **Achten Sie darauf, daß die Stange mit der Verriegelungsvorrichtung Am rechten Seite angebracht wird.(von vorne gesehen.)**

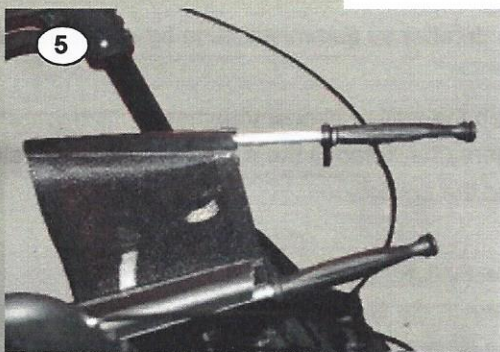


5. Skyv festestengene inn i spalten på setebrakettene.
5. Push the fitting bars into the slots in the seat brackets.
5. Die Stangen in die Spalte der Sitz befestigungen schieben



6. Monter nye bakre kurvfester. Slå de helt inn med en plastikkhammer
6. Mount the new rear fasteners on both sides. Use a plastic hammer and knock it home.
6. Die hinteren Befestigungen anbringen.



7. Vri kurvstrikken en halv omdreining og fest den på braketten
7. Twist the rubber band half a turn and fasten it to the bracket.
7. Das Gummiband halb omdrehen und danach an der Stange anhängen.

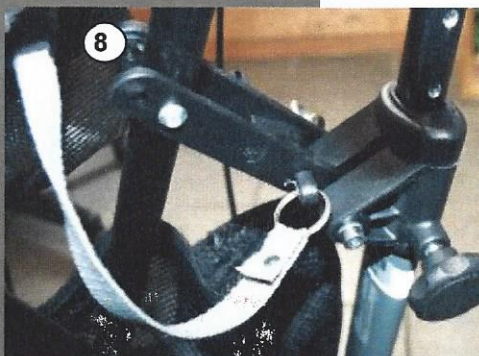

8. Monter utlørsersnor på begge sider.
8. Mount the ripcord on both sides.
8. Die Greifsnur auf beiden Seiten anbringen.